

LUNA 6

Vartotojo vadovas V1.0



ZOOMAX Technology Co., Limited

9F, D pastatas, Paradise Software Park, No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, Kinija 310012

Autorinės teisės© 2021 ZOOMAX Technology Co., Limited. Visos teisės saugomos. ZOOMAX® yra "ZOOMAX Technology Co., Limited" prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminama ar perduodama bet kokia forma ar bet kokiomis elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis bet kokių tikslų be aiškaus raštiško "ZOOMAX" leidimo.

TURINYS

1. ĮVADAS	1
2. SAUGA IR PRIEŽIŪRA	1
3. SUSIPAŽINKITE SU LUNA 6	2
3.1 KAS YRA DĖŽUTĖJE	2
3.2 BENDRAS APRAŠYMAS.....	3
3.3 ĮKRAUTI AKUMULIATORIŲ	6
4. PAGRINDINIS VEIKIMAS	7
4.1 ATIDARYTI RANKENĄ	7
4.2 MAITINIMO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS	8
4.3 ARTIMAS/ATSTUMTAS VAIZDAS.....	8
4.4 ZOOM VALDYMAS	9
4.5 PASIRINKTI SPALVŲ REŽIMĄ	9
4.6 UŽŠALDYMAS	10
4.6.1 UŽŠALDYTI VAIZDĄ.....	10
4.6.2 PANORAMINIS VAIZDAS	10
4.6.3 IŠSAUGOTI ĮRAŠĄ	11

5. IŠPLĖSTINIS VEIKIMAS	11
5.1 PAGRINDINIS MENIU	11
5.1.1 1 GALERIJA	13
5.1.2 LED ŽIBINTAI	13
5.1.3 GARSAS	14
5.1.4 EKRANO RYŠKUMAS	14
5.1.5 KONTRASTO INTENSYVUMAS	14
5.1.6 SPALVŲ REŽIMAS	15
5.1.7 SKAITYMO LINIJA ARBA KAUKĖS	16
5.2 SISTEMOS NUSTATYMAI	17
5.2.1 ATNAUJINIMO GREITIS	18
5.2.2 ENERGIJOS TAUPYMAS	18
5.2.3 1 PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJA.....	19
5.2.4 ATKURTI GAMYKLINIUS NUSTATYMUS	19
5.2.5 PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS	19
6. KITOS FUNKCIJOS	19
6.1 FAILŲ PERKĖLIMAS SU KOMPIUTERIU	19
6.2 PRIJUNGTI PRIE TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS	20

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	21
8. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.....	22
9. KITI ZOOMAX PRODUKTAI.....	23

1. Įvadas

Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Šis vadovas padės jums geriau suprasti "Luna 6" funkcijas.

Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius. Todėl gali būti, kad šis vadovas nėra naujausia turima versija. Naujausią naudotojo vadovą galite atsisiųsti techninės pagalbos skyriuje adresu www.zoomax.com.

2. Sauga ir priežiūra

Palaikyti optimalią "Luna 6" būklę:

- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nelaikykite "Luna 6" pernelyg karštoje aplinkoje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Naudokite "Luna 6" aplinkoje, kurioje temperatūra yra nuo 10 °C iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °C).
- Kad išvengtumėte elektros pažeidimo pavojaus, laikykite "Luna 6" atokiau nuo skysčių ir cheminių medžiagų.

- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nebandykite ardyti įrenginio. Užklausas dėl aptarnavimo perduokite "Zoomax" arba įgaliotam remonto centrui.
- Prieš valydami visada atjunkite įrenginį "Luna 6" nuo elektros tinklo. Išorę valykite valikliu arba minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių medžiagų, nes jos sugadins vaizdo didintuvą.


3. Susipažinkite su Luna 6

3.1 Kas yra dėžutėje


"Luna 6" pakuotės dėžutėje rasite šiuos elementus:

- Luna 6
- Nešiojimo dėklas
- USB-C kabelis
- Valymo šluostė
- Vartotojo vadovas
- Maitinimo adapteris
- HDMI kabelis
- Belaidis įkroviklis

3.2 Bendras Aprašymas

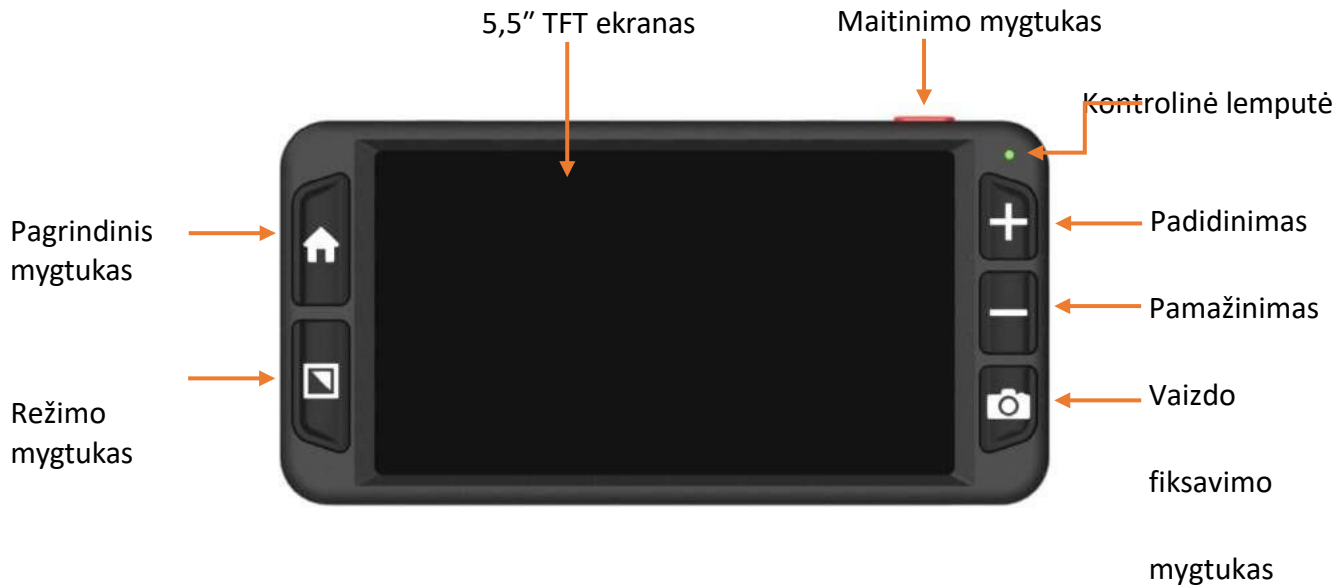



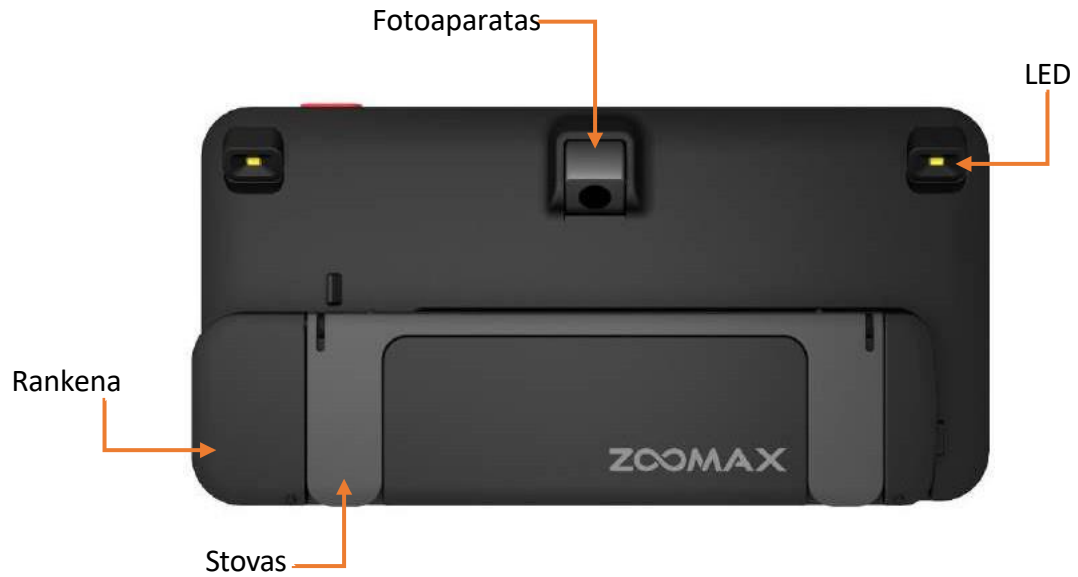

3.3 Įkraukite akumuliatorių


Akumuliatorius PRIVALO būti visiškai įkrautas prieš PIRMĄ naudojimą su pridedamu maitinimo adapteriu. Yra du įkrovimo būdai: belaidis įkrovimas ir laidinis įkrovimas.

- Belaidis įkrovimas: Prijunkite adapterį prie belaidžio įkroviklio. Uždėkite "Luna 6" ant belaidžio įkroviklio ir įsitikinkite, kad fotoaparatas yra fotoaparato lizde, o rankena įstatyta - į rankenos lizdą.



- Laidinis įkrovimas: Prijunkite adapterį tiesiogiai prie "Luna 6" per USB-C jungtį, esančią viršutiniame "Luna 6" krašte.

Kol prietaisas įkraunamas, maitinimo indikatoriaus lemputė šviečia raudonai. Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, maitinimo indikatoriaus lemputė išsijungs.

Nepertraukiamai "Luna 6" galite naudoti ilgiau nei 4 valandas. Kai akumuliatorius išsikrauna, ekrane bus rodoma piktograma "išsikrovęs akumuliatorius" , o tada Luna 6 išsijungs.

4. Pagrindinis veikimas

4.1 Atidarykite rankeną

Ištraukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, esančią "Luna 6" nugarėlėje. Nuo 0° iki 180°, rankena gali būti bet kurioje padėtyje. Atverskite rankeną pagal toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotą iliustraciją.



Paveikslas: atidarykite rankeną

4.2 Maitinimo įjungimas / išjungimas

Paspauskite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte "Luna 6". Tokiu pat būdu galite prietaisą išjungti.

Po 3 minučių neveikimo prietaisas išsijungs automatiškai. Šią energijos taupymo funkciją galite išjungti sistemos nustatymuose. Žr. skyrių "Energijos taupymo įjungimas / išjungimas" 18 puslapyje.

4.3 Artimųjų / tolimųjų atstumų vaizdas -

Atidarykite arba uždarykite rankenėlę, kad perjungtumėte artimojo ir tolimojo matymo režimą. Kai rankena uždaryta, Luna 6 veikia artimojo matymo režimu. Atidarius rankenėlę, Luna 6 persijungia į tolimojo žiūrėjimo režimą.

Patarimai: Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatas fokusuoja automatiškai. Kai fotoaparatas praranda fokusavimą, taip pat galite vienu metu trumpai paspausti režimo mygtuką ir sustabdymo mygtuką, kad vėl sufokusuotumėte.

4.4 Priartinimo valdymas

Paspauskite didinimo mygtuką, kad padidintumėte didinimą, ir paspauskite mažinimo mygtuką, kad sumažintumėte didinimą.

4.5 Pasirinkite spalvų režimą

Spalvų režimai apima visas spalvas ir 10 labai kontrastingų spalvų derinių: balta/juoda, juoda/balta, geltona/juoda, juoda/geltona, balta/mėlyna, mėlyna/balta, žalia/juoda, juoda/žalia, mėlyna/geltona ir geltona/mėlyna.

Mėgstamą spalvų režimą galite pasirinkti pagrindinio meniu nustatymuose. Žr. skyrių "Spalvų režimas" 15 puslapyje.

Paspauskite režimo mygtuką 1 sekundę didelio kontrasto spalvų režime, kad greitai perjungtumėte į visiškų spalvų režimą.

4.6 Užšaldyti

4.6.1 Užšaldyti vaizdą

Norėdami užfiksuoti vaizdą, paspauskite užrakto mygtuką. Paspauskite mygtukus Zoom in (priartinti) arba Zoom out (atitolinti), kad pakeistumėte užfiksuoto vaizdo didinimo lygį, arba mygtuką Mode (režimas), kad pakeistumėte spalvas.

4.6.2 Paningavimas

Padidintus vaizdus galite paslinkti naudodami panoramavimo funkciją, judindami juos vertikaliai ir horizontaliai per ekrano plotą, kad peržiūrėtumėte tam tikras vaizdo sritis.

Užfiksavę vaizdą, paspauskite mygtuką Priartinti, kad vaizdas būtų padidintas. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką "Home" kartu su bet kuriuo iš "Freeze/Mode/Zoom out/Zoom in" mygtukų, kad vaizdą atitinkamai perkeltumėte aukštyn/žemyn/į kairę/dešinę. Trumpai paspauskite šiuos mygtukus, kad vaizdas būtų perkeliamas po truputį, arba laikykite juos paspaudę, kad vaizdas būtų perkeliamas nepertraukiamai.

4.6.3 Išsaugoti vaizdą

Norėdami išsaugoti užšaldytą vaizdą, vienu metu paspauskite užšaldymo mygtuką ir priartinimo mygtuką. Ekране pasirodys varnelės / žymeklio piktograma, rodanti, kad vaizdas išsaugotas.

Jei ekране rodomas užrašas "Memory is full" (atmintis užpildyta), tai reiškia, kad atmintis užpildyta ir jei norite išsaugoti naujas nuotraukas, kai kurias reikia ištrinti.

5. Išplėstinis veikimas

5.1 Pagrindinis meniu


Realaus laiko rodinyje trumpai paspauskite mygtuką Home, kad įjungtumėte pagrindinį meniu.

Pagrindiniame meniu yra 8 parinktys: Galerija, LED lemputės, Garso įjungimas/išjungimas, Ekranų ryškumas, Kontrasto intensyvumas, Spalvų režimas, Skaitymo linija ir užsklanda, Sistemos nustatymai.


Norėdami pasirinkti meniu parinktį, judinkite didinimo / mažinimo mygtuką,

kad pereitumėte per piktogramas, ir paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte.

Norėdami grįžti atgal, paspauskite užšaldymo mygtuką. Paspauskite mygtuką Home, kad grįžtumėte tiesiai į realaus laiko rodinį.

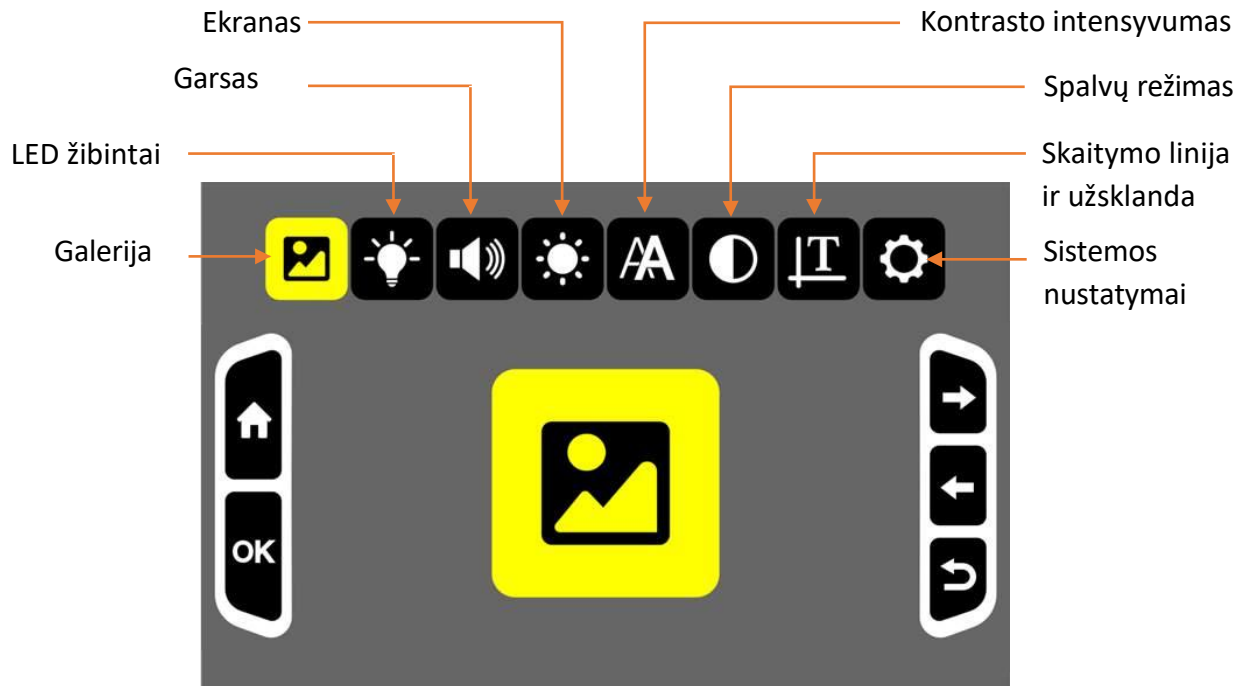

5.1.1 Galerija

Galerijoje  , paspauskite priartinimo / atitolinimo mygtukus, kad peržiūrėtumėte vaizdus, tada paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte ir peržiūrėtumėte pasirinktą vaizdą. Spalvų režimą galite keisti paspausdami mygtuką Mode (režimas) arba peržiūrėti vaizdo detales naudodami panoramavimo funkciją. Žr. 4.6.2 skyrių, 10 psl. skyrių "Panoramavimas".

Norėdami ištrinti vaizdą, vienu metu paspauskite mygtuką "Freeze" ir mygtuką "Zoom out". Norėdami grįžti atgal, paspauskite mygtuką Stabdyti.

5.1.2 LED žibintai

Šią parinktį pasirinkite norėdami įjungti ir išjungti LED lemputes. Nustatyme LED šviesos diodų apšvietimas paspauskite didinimo / mažinimo mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš dviejų parinkčių. Paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte.

Pagal numatytuosius nustatymus įjungtos abi LED lemputės.

5.1.3 Garsas

Šią parinktį pasirinkite norėdami nustatyti sistemos garsą. Garso nustatyme paspauskite didinimo / mažinimo mygtukus, kad pasirinktumėte "garsas įjungtas" arba "garsas išjungtas", ir paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte.

Garsas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

5.1.4 Ekranas Ryškumas

Šią parinktį pasirinkite norėdami sureguliuoti ekrano ryškumą. Nustatydami ekrano ryškumą, paspauskite didinimo / mažinimo mygtukus, kad pakeistumėte ekrano ryškumą, ir paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte.

5.1.5 Intensyvumas Kontrastas

Didelio kontrasto spalvų režimu teksto ryškumui gali turėti įtakos apšvietimo sąlygos ir pati skaitymo medžiaga. Programa "Luna 6" suteikia galimybę keisti kontrastingos spalvos intensyvumą, kad užtikrintumėte geriausią skaitymo patirtį.

Nustatyme Intensity of Contrast (kontrasto intensyvumas) paspauskite didinimo / mažinimo mygtukus, kad pakeistumėte intensyvumą, ir paspauskite mygtuką Mode (režimas), kad patvirtintumėte.

Peržiūrint realiuoju laiku, intensyvumą galite reguliuoti sparčiuoju būdu: palaikykite nuspaudę režimo mygtuką ir trumpai paspauskite didinimo / mažinimo mygtuką, kad padidintumėte / sumažintumėte intensyvumo lygį.

PASTABA: Prieš įvesdami kontrasto intensyvumo nustatymą, įsitikinkite, kad realiuoju laiku rodomas vaizdas yra didelio kontrasto spalvos. Reguliavimas neveiks, jei realaus laiko vaizdas yra pilno kontrasto spalvų režime.

5.1.6 Spalvų režimas

Spalvų režimo nustatyme galite paslėpti didelio kontrasto spalvas, kurių dažnai nenaudojate.

Paspauskite didinimo/mažinimo mygtuką, kad pereitumėte nuo vienos spalvos prie kitos. Paspauskite mygtuką Režimas, kad pasirinktumėte arba atšauktumėte konkretų spalvų režimą. Brūkšninė linija ant piktogramos reiškia, kad pasirinktas spalvų režimas yra paslėptas. Atlikę tai, paspauskite mygtuką Freeze (Stabdyti) arba mygtuką Home (Pagrindinis), kad išeitumėte.

5.1.7 Skaitymo linija arba kaukės


Nustatyme Skaitymo eilutė arba Kaukės paspauskite didinimo/mažinimo mygtuką, kad pereitumėte prie penkių skaitymo eilučių ir kaukių parinkčių. Kai tai atliksite, paspauskite mygtuką Freeze (Stabdyti) arba mygtuką Home (Namai), kad išeitumėte.

Peržiūrėdami realiuoju laiku, taip pat galite paspausti priartinimo ir nutolinimo mygtukus, kad suaktyvintumėte skaitymo liniją ir užsklandas.

Laikydami nuspaustą mygtuką "Home" ir vienu metu paspausdami mygtuką "Zoom in/Zoom out", reguliuokite eilutės padėtį arba skaitymo kaukės plotį.

5.2 Sistemos nustatymai

Sistemos nustatymai yra paskutinė pagrindinio meniu parinktis. Dėl sistemos nustatymų rekomenduojama pasitarti su tiekėju.

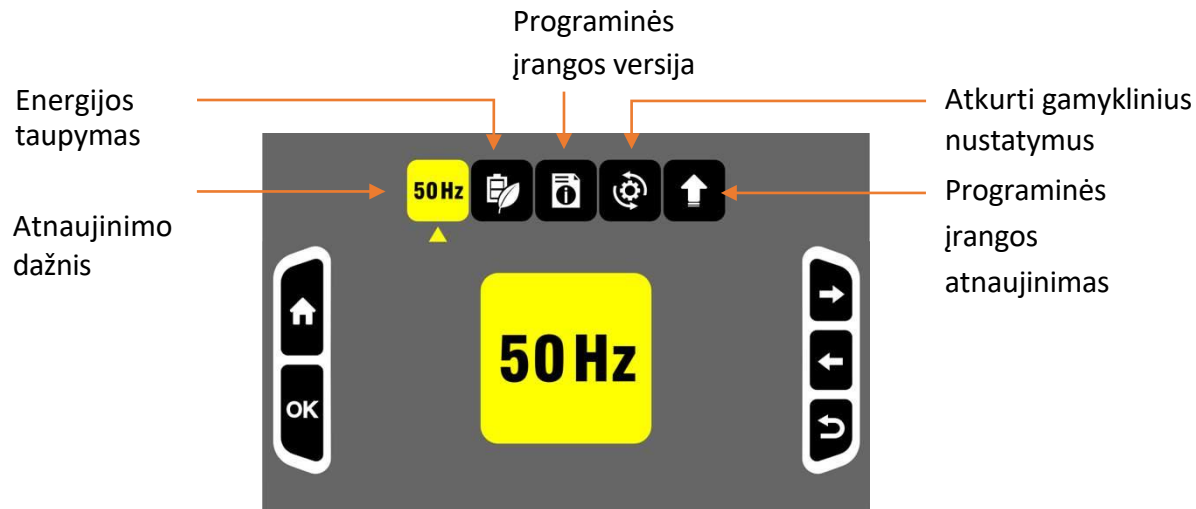

Norėdami pasirinkti sistemos nustatymų parinktį, judinkite didinimo / mažinimo mygtuką, kad pereitumėte per piktogramas, ir paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte. Norėdami grįžti atgal, paspauskite mygtuką Freeze (Stabdyti), o norėdami išeiti - mygtuką Home (Pagrindinis).

5.2.1 Atnaujinimo greitis

Norėdami pakeisti atnaujinimo dažnį, pasirinkite piktogramą 60 Hz/50 Hz (bus rodoma 60 Hz arba 50 Hz) ir paspauskite režimo mygtuką, kad įeitumėte į nustatymus. Paspauskite didinimo / mažinimo mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš 2 parinkčių.

Numatytasis atnaujinimo dažnis yra 60 Hz.

5.2.2 Maitinimas Taupymas

Pagal numatytuosius nustatymus "Luna 6" automatiškai išsijungia po 3 minučių neveikimo.

Norėdami įjungti arba išjungti energijos taupymą, naudodami mygtuką Padidinti arba sumažinti pasirinkite vieną iš 2 parinkčių nustatyme Energijos taupymas. Išjungus šią funkciją, "Luna 6" veiks tol, kol išsikraus akumulatorius.

5.2.3 Programinės įrangos versija

Ši parinktis rodo "Luna 6" programinės įrangos versiją.

5.2.4 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Naudokite šią funkciją norėdami atkurti gamyklinius Luna 6 nustatymus.

5.2.5 Programinės įrangos atnaujinimas

Skirta tik "Zoomax" serviso ir (arba) platintojo reikmėms.

6. Kitos funkcijos

6.1 Failų perkėlimas su PC

Luna S išsaugotus failus galima perkelti į Window® kompiuterį naudojant pridedamą USB kabelį. Prieš perkeldami vaizdus, įjunkite ir "Luna 6", ir kompiuterį. Prijunkite juos tiekiamu USB kabeliu.



Jei norite į kompiuterį perkelti "Luna 6" išsaugotus vaizdus, pasirinkite aplanke "Luna 6" esančius vaizdus (aplanko kelias yra: Kompiuteris > Luna 6 > DCIM) ir pasirinkite vaizdą, kurį norite perkelti.

PASTABA: vaizdų perkėlimas iš kompiuterio į "Luna 6" griežtai draudžiamas.

6.2 Prisijungimas prie televizoriaus arba monitoriaus

Norėdami peržiūrėti vaizdus didesniame ekrane, naudokite pridedamą HDMI kabelį ir prijunkite "Luna 6" prie HDMI televizoriaus arba monitoriaus. Daugumoje televizorių reikės pakeisti įvesties šaltinį, kad būtų galima peržiūrėti vaizdą iš "Luna 6". Prijungus, vaizdas iš "Luna 6" bus rodomas televizoriuje arba monitoriuje.

7. Trikčių šalinimas

1 problema: juodas

ekranas.

Sprendimai:

- Įsitikinkite, kad įjungtas maitinimas.
- Įkraukite akumuliatorių.
- Sumažinkite didinimo lygį arba pakeiskite spalvų režimą.

2 problema: vaizdas ekrane yra tamsus arba iškraipytas.

Sprendimai:

- Užtikrinkite, kad įrenginys būtų padėtas lygiai ant žiūrimos medžiagos.
- Įsitikinkite, kad šviečia šviesos diodų lempučių.
- Patikrinkite ekrano ryškumo lygį.

3 problema: Dėmės arba dėmės ant ekrano.

Sprendimas: Išvalykite fotoaparata ir ekraną minkštu audiniu.

4 problema: įrenginys prijungtas prie televizoriaus, tačiau televizoriaus ekrane nerodomas joks vaizdas.

Sprendimai:

- Įsitikinkite, kad televizorius įjungtas.
- Įsitikinkite, kad televizoriaus įvesties šaltinis nustatytas teisingai.
- Įsitikinkite, kad HDMI kabelis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

5 problema: bet kokia kita šiame vadove nepaminėta problema.

Sprendimai:

- Paspauskite maitinimo mygtuką 10 sekundžių, kad priverstinai išjungtumėte sistemą.
- Jei visa kita nepavyksta, kreipkitės į vietinį "Zoomax" platintoją arba "Zoomax" palaikymo tarnybą.

8. Techninė specifikacija

- **Didinimas:** 2,5X - 19X
- **Ekranas:** 5,5 colio ekranas
- **Ekrano skiriamoji geba:** 1280 x 720
- **Fotoaparatas:** 13 MP

- **Fokusavimas:** automatinis fokusavimas ir pakartotinis fokusavimas vienu metu trumpai paspaudus režimo mygtuką ir sustabdymo mygtuką
- **Spalvų režimai:** visos spalvos ir 10 didelio kontrasto spalvų režimų
- **Svoris:**
 - "Luna 6": 210 g/0,46 kg
 - belaidis įkroviklis: 92g/0,21lbs
- **Matmenys:** 160 x 80 x 11 mm/6,3 x 3,1 x 0,4 in
- **Akumuliatoriaus veikimo laikas:** daugiau nei 4 valandos nepertraukiamo naudojimo
- **Laidinio įkrovimo laikas:** mažiau nei 3 valandos
- **Belaidžio įkrovimo laikas:** apie 4 val.
- **Maitinimo adapteris:** įvestis: 100-240V; išėjimas: MAITINIMO ŠALTINIS: 5V/2,5A

9. Kiti ZOOMAX produktai

Apsilankykite svetainėje www.zoomax.com ir susipažinkite su visa mūsų gaminių (rankinių, stalinių ir dėvimų prietaisų) linija.

ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED

9F, D pastatas, Paradise Software Park,
No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou,
Zhejiang Province, 310012, Kinija

Tel.: +86-571-87006308

Faksas: +86-571-87397220

El. paštas: support@zoomax.com

Aplankykite mus adresu:

www.zoomax.com

