

LUNA S

Rankinis vaizdo didintuvas

Vartotojo vadovas

ZOOMAX Technology Co., Limited

9F, D pastatas, Paradise Software Park, No.3
Xidou-men Road, Xihu District, Hangzhou, Kinija
310012

Autorinės teisės© 2021 ZOOMAX Technology Co.,
Limited. Visos teisės saugomos.

ZOOMAX® yra "ZOOMAX Technology Co.,
Limited" prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse. Šiame dokumente
pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio
įspėjimo. Jokia šio leidinio dalis negali būti kopijuojama
ar perduodama bet kokia forma ar bet kokiomis
elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis bet
koku tikslu be aiškaus raštiško "ZOOMAX" leidimo.

VARTOTOJO VADOVAS

1. Įvadas	1
2. Kas yra dėžutėje	1
3. Bendras aprašymas	2
4. Akumuliatorius	3
4.1. Įkraukite akumuliatorių	3
4.2. Energijos taupymas	3
5. Pagrindinis veikimas	4
5.1. Įjungtas maitinimas	4
5.2. Reguluokite didinimą	4
5.3. Spalvų režimo keitimas	5
5.4. Užšaldyti vaizdą	6
6. Išplėstinės funkcijos	7
6.1. FM radijas	7
6.2. Žibintuvėlio režimas	7
6.3. Vaizdo pasukimas	8
6.4. Valdymas balsu	8
7. Nustatymai	11
7.1. Pyptelėjimo garsai	11
7.2. Fotoaparato šviesa	11

7.3. Ekranų ryškumas.....	12
7.4. Atminties funkcija	12
7.5. Gamyklinio atstatymo funkcija.....	12
8. Kita informacija	13
8.1. Įdiekite akumuliatorių	13
8.2. Trumpojo dirželio montavimas	13
8.3. Rašymo stovas	13
9. Trikčių šalinimas	14
10. Sauga ir priežiūra	15
11. Specifikacijos.....	16

1. Įvadas


"Zoomax® Luna S" yra modernus, lengvas rankinis vaizdo didintuvas su 4,3 colio plačiaekranu TFT ekranu. Jame galima naudotis tiek pagrindinėmis vaizdo didintuvo funkcijomis (iki 19 kartų didinimas, 10 kontrastingų spalvų ir t. t.), tiek pažangiomis funkcijomis, pavyzdžiui, FM radiju ir valdymu balsu (galima tam tikrose šalyse / regionuose).

2. Kas yra dėžutėje

"Luna S" pakuotės dėžutėje rasite šiuos elementus:


 <p>Vaizdo didintuvas</p>	 <p>Trumpas dirželis</p>
 <p>Naudotojo vadovas</p>	 <p>Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius</p>
 <p>Apsauginis dėklas</p>	 <p>Kintamosios srovės maitinimo adapteris</p>

3. Bendra Aprašymas

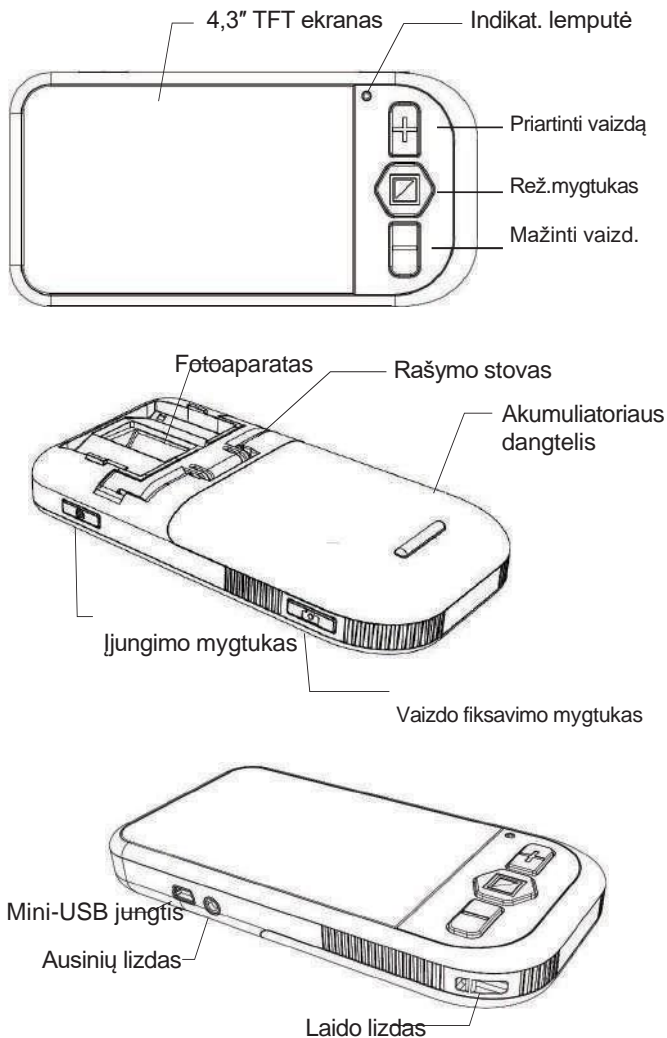

4. Akumulatorius

4.1. Įkraukite akumuliatorių

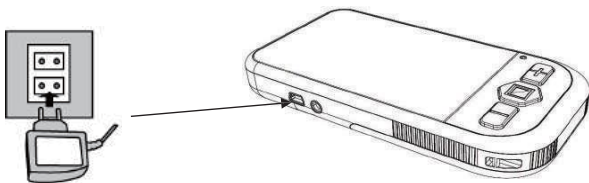

Pastaba: prieš pirmą kartą naudodami "Luna S" įsitikinkite, kad akumuliatorius įkrautas.

Įkrovimo instrukcijos

- 1) Kintamosios srovės maitinimo adapterio galą įkiškite į el. lizdą.
- 2) Prijunkite adapterio kabelį prie "Luna S" per "Mini-USB" jungtį.
- 3) Įkrovimo metu indikatorius šviečia raudonai.
- 4) Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, indikatorius užsidega žaliai, jei įrenginys įjungtas, arba išsijungia, jei įrenginys išjungtas.
- 5) Jei ekrane pasirodo piktograma "išsikrovęs akumuliatorius", tai reiškia, kad akumuliatorius išsikrovė ir aparatas netrukus išsijungs.

"Luna S" įkrovimo trukmė - 4 valandos. Visiškai įkrautas akumuliatorius veiks maždaug 3 valandas. Galite įsigyti papildomą akumuliatorių ilgoms kelionėms ar ilgesniam naudojimui.

4.2. Maitinimas Taupymas

Taupant energiją, "Luna S" automatiškai išsijungs po 3 minučių neveikimo.


5. Pagrindinis veikimas

5.1. Įjungimas



Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Maitinimo indikatorius užsidegs žaliai. Tokiu pat būdu galite išjungti įrenginį.

5.2. Sureguliuokite didinimą

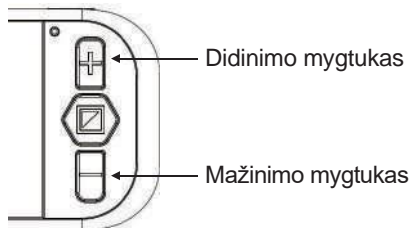

Paspauskite mygtuką Padidinti, kad priartintumėte vaizdą, ir mygtuką Sumažinti, kad sumažintumėte vaizdą.

Didinimo lygiai:

- P a d ė j u s "Luna S" plokščiai ant popieriaus, didinimas gali būti nuo 3,8x iki 19x.
- Jei "Luna S" naudojamas su atviru rašymo stovu, mažiausias didinimas bus 2x.

5.3. Keisti spalvos režimą



Galite pasirinkti įprastą ir mėgstamą/- supaprastintą režimą:

Įprastas režimas

Įprastiniu režimu paspauskite režimo mygtuką, kad galėtumėte rinktis šiuos peržiūros režimus:

- Tikrų spalvų režimas
- Pilkumo skalė
- Didelio kontrasto režimai, įskaitant:

Baltas ant juodo/juodas ant balto

Baltas ant mėlyno/mėlynas ant balto

Geltonas ant juodo/juodas ant geltono

Mėlynas ant geltono/geltonas ant mėlyno

Mėgstamiausias / supaprastintas režimas

Šiame režime paspauskite režimo mygtuką, kad galėtumėte rinktis 3 spalvų režimus: tikros spalvos, mėgstamos didelio kontrasto spalvos ir atvirkštinės spalvos (pvz., balta ant mėlynos ir mėlyna ant baltos).


Norėdami įjungti mėgstamiausią režimą, įprastu režimu pasirinkite mėgstamiausią kontrasto spalvą, tada paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką 3 sekundes, kol išgirsite du pyptelėjimus. Pasirinktas spalvų režimas bus jūsų mėgstamiausios spalvos režimas.

Pastaba: Jei įrenginys į mėgstamiausią režimą įeina iš tikros spalvos režimo arba pilkosios skalės, o ne iš didelio kontrasto spalvos, perjungimas bus tarp tikros spalvos, baltos ant juodos ir juodos ant baltos.

Norėdami išėiti iš mėgstamiausio režimo, paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką 3 sekundes, kol vėl išgirsite du pyptelėjimus.

5.4. Užfiksuoti vaizdą

Fiksavimo mygtukas "Freeze"

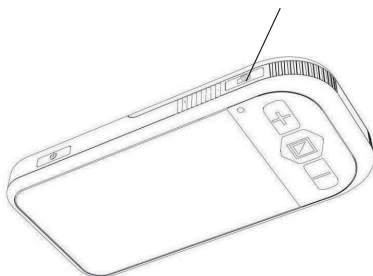


Naudodami funkciją "Freeze" (iššaldymas) užfiksuokite vaizdus ir raides, kad galėtumėte pakelti įrenginį ir apžiūrėti iš arčiau.

- 1) Uždėkite įrenginį ant objekto ar medžiagos.
- 2) Paspauskite mygtuką Freeze (užšaldyti), ir vaizdas bus užšaldytas.
- 3) Dabar galite pakelti įrenginį ir priartinti jį prie savęs, kad pamatytumėte vaizdo detales.
- 4) Paspauskite mygtukus Padidinti arba Pamažinti, kad priartintumėte arba nutolintumėte vaizdą, arba paspauskite mygtuką Režimas, kad pakeistumėte spalvų režimą.
- 5) Norėdami grįžti į realaus laiko vaizdą, dar kartą paspauskite mygtuką "Freeze".


6. Išplėstinės funkcijos

6.1. FM Radijas

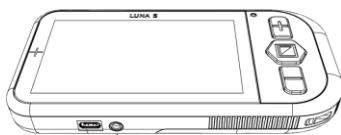

Ausinių jungtis

"Luna S" leidžia klausyti FM radijo. Su ausinėmis* galite klausyti mėgstamos vietinės radijo stoties.

Norėdami įjungti FM radijo funkciją, vienu metu palaikykite mygtuką "Freeze" ir Režimo mygtuką, kol ekrane pasirodys radijas . Tokiu pat būdu galite išeiti iš FM radijo funkcijos.

Norėdami perjungti radijo kanalus, paspauskite mygtukus Padidinti arba Pamažinti.

Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite mygtuką "Freeze", kad padidintumėte garsumą, arba Režimo mygtuką, kad sumažintumėte garsumą.

* Ausinės arba ausinės su 3,5 mm (1/8") kištuku.

6.2. Žibintuvėlio režimas

Žibintuvėlio režimu galite naudoti "Luna S" kaip rankinį prožektoriuoką.

Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte žibintuvėlio režimą. Įjungus žibintuvėlio režimą, ekranas išsijungs, o kitos funkcijos taip pat bus neaktyvios.

Norėdami išeiti, dar kartą trumpai paspauskite maitinimo mygtuką. Išjungus žibintuvėlio režimą, "Luna S" ekranas vėl bus įjungtas.

6.3. Pasukite vaizdą

Kai vaizdas yra mažiausio didinimo, paspauskite ir 2 sek. palaikykite didinimo mygtuką, kad vaizdas būtų pasuktas 180° kampu. Tokiu pat būdu galite jį pasukti atgal.

6.4. Valdymas balsu *

Valdymas balsu yra unikali "Luna S" funkcija, palengvinanti naudojimąsi laisvų rankų įranga. Norėdami įjungti valdymo balsu funkciją, ištarkite "Hi, Luna". Ekrane pasirodys: "Voice function is on, please speak" (Balso funkcija įjungta, kalbėkite). Tada, atlikę kelias balso komandas, galėsite lengvai naudotis "Luna S".

Balso funkcija bus automatiškai išjungta po 1 minutės, kai balso komanda nebus duota. Ją išjungus, ekrane pasirodys teksto užrašas "Voice function is off and inactive" (Balso funkcija išjungta ir neaktyvi).

* Valdymas balsu galimas tik tam tikrose šalyse ir regionuose.

Valdymo balsu funkcijos

- Priartinti / atitolinti vaizdą:

Pasakykite "didelis"/"mažas", ir vaizdas bus padidintas / pamažintas vienu lygiu. Komanda veikia ir realaus laiko, ir sustabdytame rodinyje.

- Spalvų režimo keitimas

Pasakykite "color" (spalva), ir spalvų režimas pasikeis taip pat, kaip ir paspaudus režimo mygtuką. Esant bet kokiam spalvų režimui, ištarkite spalvų režimo pavadinimą (pvz., "tikra spalva" arba "juoda balta"), ir spalvų režimas automatiškai pasikeis į nurodytąjį.

- Užfiksuoti vaizdą

Kai naudojate realaus laiko rodinį, ištarkite "photo", ir

ekranas bus sustabdytas. Pasakykite "photo off" (nuotrauka išjungta), ir ekrane vėl bus rodoma realiuoju laiku.

- FM radijas

Kai naudojate realaus laiko rodinį, išstarkite "radio", ir FM radijas bus įjungtas. Jei norite išeiti iš FM radijo režimo, išstarkite "radio off".

- Žibintuvėlio režimas

Pasakykite "light on", kad įjungtumėte žibintuvėlio režimą. Jei norite išjungti žibintuvėlio režimą, išstarkite "šviesa išjungta".

- Išjungti maitinimą

Pasakykite "power off", kad per 3 sekundes išjungtumėte "Luna S".

Balso komandos

Išsamias instrukcijas rasite šioje lentelėje:

Valdymas balsu	Funkcija
Hi, Luna	Valdymo balsu įjungimas
Power off	Išjunkite "Luna S"
Big	Padidinti vaizdą
Small	Pamažinti mastelį
Photo	Vaizdo įšaldymas
Photo off	Grįžkite į peržiūros režimą
Radio	Įjunkite radiją
Radio off	Išjunkite radiją
Light on	Įjunkite žibintuvėlio režimą

Light off	Išėjimas iš žibintuvėlio režimo
Color	Keisti spalvų režimą
True color	Pakeiskite spalvų režimą į tikrąją spalvą
Black White	Pakeiskite spalvų režimą į baltą ant juodos spalvos
White black	Pakeiskite spalvų režimą į juodą ant balto
Blue white	Pakeiskite spalvų režimą į baltą ant mėlynos spalvos
White blue	Pakeiskite spalvų režimą į mėlyną ant baltos spalvos
Black yellow	Pakeiskite spalvų režimą į geltoną ant juodos spalvos
Yellow black	Pakeiskite spalvų režimą į juodą ant geltonos spalvos
Yellow blue	Pakeiskite spalvų režimą į mėlyną ant geltonos
Blue yellow	Pakeiskite spalvų režimą į geltoną ant mėlynos

7. Nustatymai

7.1. Pyptelėjimas Garsai




Pagal numatytuosius nustatymus įjungtas mygtuko pyptelėjimo garsas.

Norėdami jį išjungti, paspauskite ir 5 sek. palaikykite pamažinimo mygtuką, kol išgirsite vieną pyptelėjimą.

Norėdami jį vėl įjungti, dar kartą paspauskite ir 5 sek. palaikykite pamažinimo mygtuką, kol išgirsite tris pyptelėjimus.

7.2. Fotoaparatas Šviesa

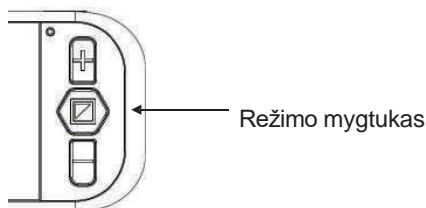

Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparato lemputė yra įjungta.

Norėdami išjungti šviesą, paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką 5 sekundes, kol išgirsite tris pyptelėjimus. Tokiu pat būdu galite įjungti šviesą.

Pastaba: prieš paskutinius tris pyptelėjimus pasigirs vienas garsinis signalas. Laikykite nuspaudę režimo mygtuką, kol pasikeis lemputė.

7.3. Ekranas Ryškumas

Norėdami įeiti į ryškumo reguliavimą, vienu metu trumpai paspauskite mygtuką Freeze ir mygtuką Zoom in (arba Zoom out) ir pasirodys ryškumo juosta.

Paspauskite didinimo mygtuką, kad padidintumėte ryškumą, ir mažinimo mygtuką, kad sumažintumėte.

Paspauskite režimo mygtuką, kad patvirtintumėte ryškumą ir išeitumėte, arba palikite 5 sekundes, kol ryškumo juosta išnyks. Nustatytas ryškumas bus išsaugotas automatiškai.

7.4. Atminties funkcija


Kitą kartą įjungus "Luna S" automatiškai išsaugos naujausius nustatymus (pvz., spalvų režimą, didinimą, mygtukų signalus, ryškumą ir t. t.).

7.5. Gamyklinio atstatymo funkcija

Mažiausio didinimo režimu vienu metu 10 sekundžių paspauskite maitinimo mygtuką ir didinimo mygtuką, kad būtų atkurti pradiniai gamykliniai nustatymai.

8. Kita informacija

8.1. Įdiekite akumuliatorių

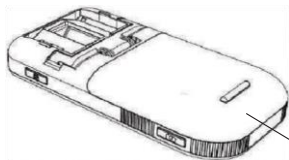

Akumuliatoriaus dangtelis


- 1) Apverskite įrenginį.
- 2) Šiek tiek paspauskite akumuliatoriaus dangtelį ir pastumkite jį, kad atsidarytų.
- 3) Įdėkite akumuliatorių. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus skylutės sutampa su akumuliatoriaus skyriuje esančiais kaiščiais.
- 4) Uždėkite dangtelį atgal ir įstumkite jį į uždara padėtį.

8.2. Trumpojo dirželio montavimas



Paimkite trumpą dirželį, įkiškite mažą kilpelę į virvelės lizdą apatiniame dešiniajame "Luna S" kampe.

8.3. Rašymo stovas

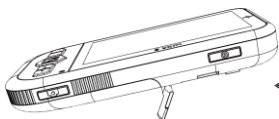

Rašymo stovas

Atidarykite rašymo stovą ir galėsite lengvai rašyti po fotoaparatu, pavyzdžiui, pasirašyti sąskaitą ar užsirašyti pastabas.

9. Trikčių šalinimas

Problemos	Sprendimai
Juodas ekranas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Įsitikinkite, kad įjungtas maitinimas. 2. Pakeiskite akumuliatorių. 3. Sumažinkite didinimo lygį. 4. Užtikrinkite, kad vaizdas būtų po kryželiu.
Įrenginys neįsijungia.	Įkraukite įrenginį.
Vaizdas ekrane tamsus arba iškraipytas.	Užtikrinkite, kad vaizdo lupa būtų plokščia ant puslapio.
Maitinimo adapteris prijungtas, bet akumuliatorius neįkraunamas.	Įsitikinkite, kad lizdas yra maitinamas ir kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą.
Dėmės ar dėmės ekrane.	Išvalykite fotoaparataž ir ekraną minkštu skudurėliu.
Tekstas per mažas, kad būtų galima jį perskaityti.	Nustatykite tinkamą didinimo lygį.
Tekstas yra per didelis, kad jį būtų galima perskaityti.	Sumažinkite didinimą iki tinkamo lygio.
Ekranas yra užšaldytas arba iškraipytas, arba bet kokia kita šiame vadove nepaminieta problema.	Iš naujo įjunkite įrenginį arba išimkite ir pakeiskite akumuliatorių.

Jei jūsų problema nenurodyta pirmiau, kreipkitės į vietinį platintoją.

10. Sauga ir priežiūra

Palaikyti optimalią "Luna S" būklę:

- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nelaikykite "Luna S" pernelyg karštoje aplinkoje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Kad išvengtumėte elektros pažeidimo pavojaus, laikykite "Luna S" atokiau nuo skysčių ir cheminių medžiagų.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nbandykite ardyti įrenginio. Užklaudas dėl techninės priežiūros kreipkitės į "Zoomax" arba į įgaliotąją remonto įmonę.
- Prieš valydami visada atjunkite "Luna S" nuo elektros tinklo. Išorę valykite valikliu arba minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių medžiagų, nes jos sugadins vaizdo padidrinimo aparatą.
- Naudojant ekrano apsaugą gali būti paveiktas jutiklinio ekrano veikimas.
- Naudokite "Luna S" aplinkoje, kurioje temperatūra yra nuo 10 °C iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °C).

11. Specifikacijos

- Didinimas: nuo 2x iki 19x
- Rodymo režimai: Tikros spalvos, pilkos skalės ir 10 didelio kontrasto spalvų režimų
- Dėmesio centre: Automatinis fokusavimas
- Ekranas: 4,3 colio TFT ekranas
- Žibintuvėlio režimas: Taip
- FM radijas: Taip
- Valdymas balsu: Galimas tam tikrose šalyse ir regionuose
- Energijos taupymas: Įrenginys išsijungs automatiškai, jei 3 minutes nebus atliekama jokia veikla.
- Baterija: Įkraunama ličio jonų baterija
 - Baterijos veikimo laikas: 3 val.
 - Įkrovimo laikas: 4 val
 - Maitinimo adapteris:
Įvestis: 110 - 240V

Išvestis: 5V/1A
- Svoris: 200 g su akumuliatoriumi, 167 g be akumuliatoriaus
- Matmenys: 16 cm x 8 cm x 2,4 cm
- Eksploatavimo ir laikymo sąlygos:
Drėgmė < 70%
Temperatūra: 10-40°C

ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED

9F, D pastatas, Paradise Software Park,
Nr.3 Xidoumen Road, Xihu rajonas, Hangdžou
Džedziango 310012, Kinija

Tel.: +86-571-87006308

Faksas: +86-571-87397220

El. paštas:

support@zoomax.com

Aplankykite mus adresu

www.zoomax.com

ZOOMAX[®]

Padidinkite savo viziją, padidinkite savo gyvenimą