


Naudotojo vadovas

“Snow Pad”

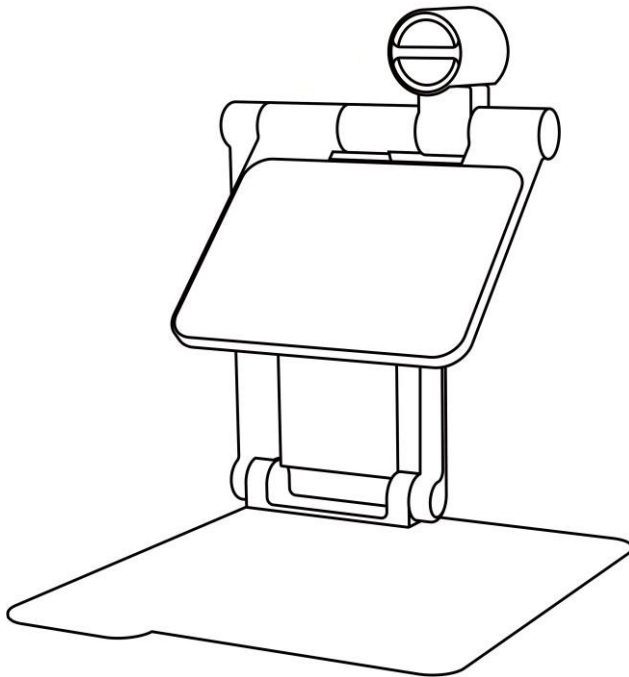

Modelis: Nešiojamas elektroninis vaizdo didintuvas
Snow Pad

Numatytas naudojimas:

Nešiojamasis elektroninis vaizdo didintuvas skirtas padėti žmonėms, turintiems presbiopiją ir silpną regėjimą, skaityti spausdintą medžiagą ir lengviau matyti daiktus mokykloje, darbe ir kasdieniame gyvenime.

Pacientų populiacija: Žmonės, turintys presbiopiją ir silpną regėjimą

Saugojimas:

Temperatūra: 0°C~30°C


Drėgmė: <70 %

Kiti: Turi būti sausoje, tamsioje, švarioje, švarioje, vėdinamoje, nekeliančioje korozijos dujų aplinkoje


Kas yra dėžutėje

- Snow Pad įrenginys x1
- Kuprinė x1
- Maitinimo adapteris x1
- Įkrovimo laidas x1
- Trumpas jungiamasis kabelis x2
- Magnetinis siurbimo lakštas x2
- Valymo šluostė x1
- Vartotojo vadovas x1
- Rašymo lenta x1

Snow Pad apžvalga

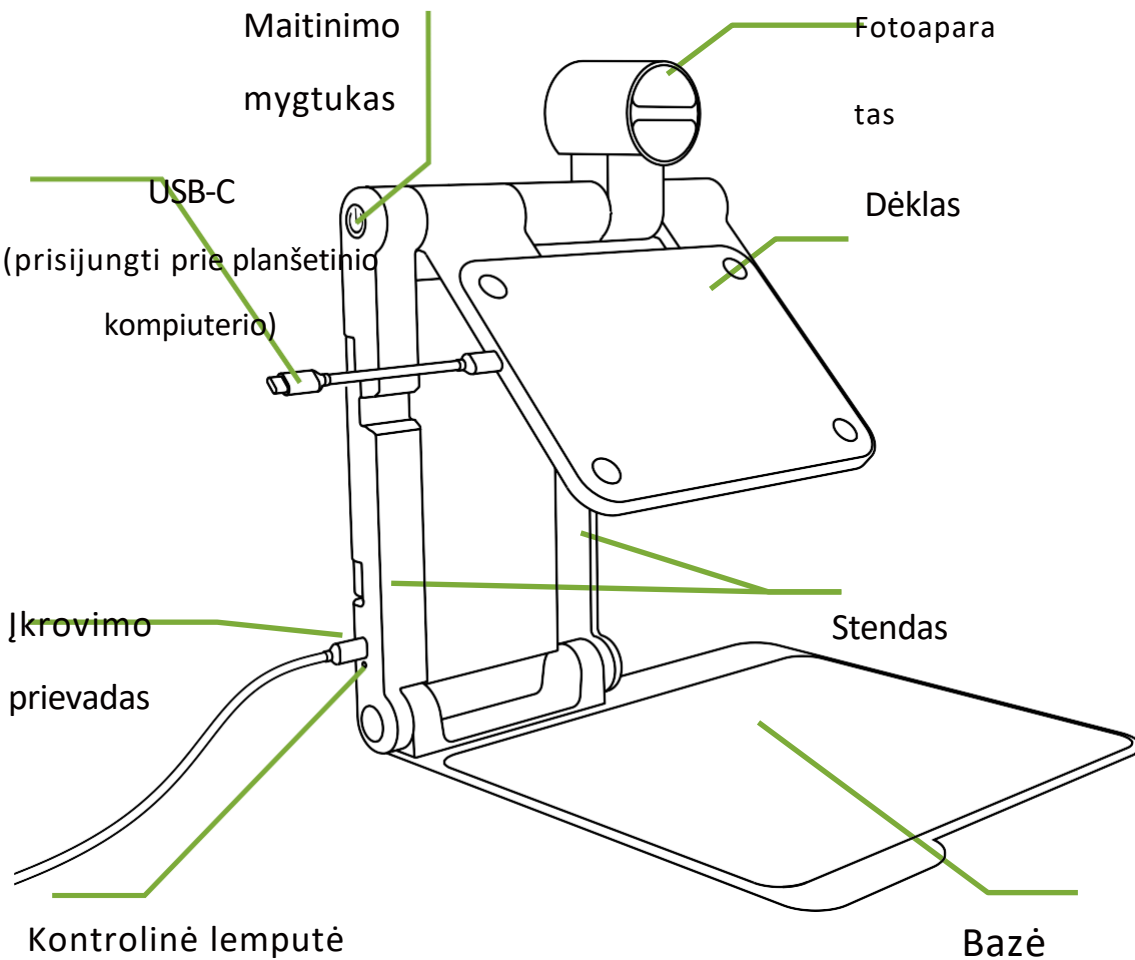


Išskleiskite Snow Pad bazę

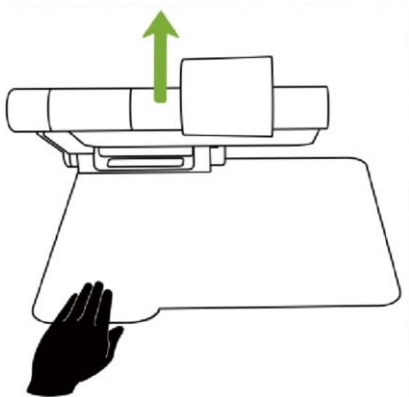


Paspauskite pagrindo bazę ir išskleiskite prietaisą į viršų.

Nustatyti planšetinį kompiuterį

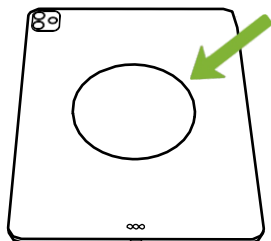


Priklijuokite apskritą magnetinį siurbtuką prie planšetinio kompiuterio ar apsauginio dėklo galinės dalies vidurio ir palaukite 15 min. prieš dėdami jį ant dėklo.

Saugokite planšetinio kompiuterio fotoaparataž nuo dėklo

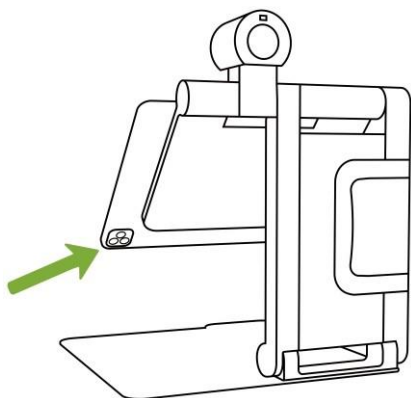


Visada įsitikinkite, kad planšetinio kompiuterio kameros neužstoja dėklas.

Pašalinti planšetinį kompiuterį

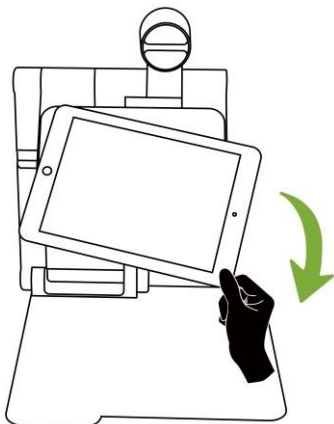

Norėdami išimti planšetinį kompiuterį, laikykite apatinį jo galą ir stumkite jį horizontaliai išilgai dėklo.

Kameros pasukimas

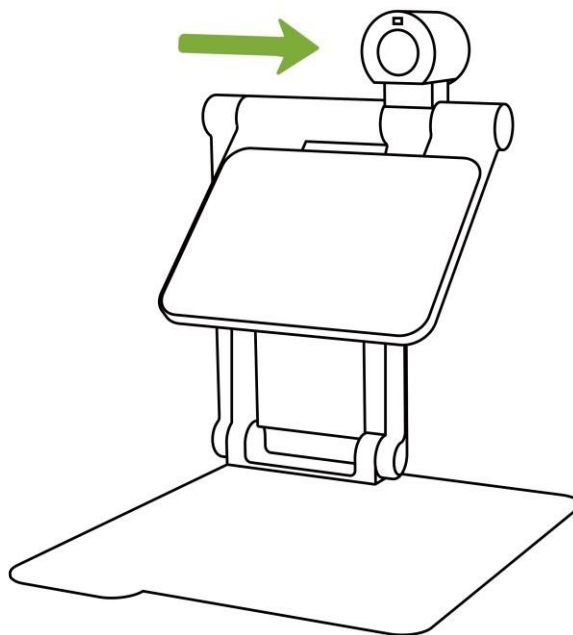

60°


60 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę



270°

270 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę

Pasukite fotoaparatą aukštyn ir žemyn

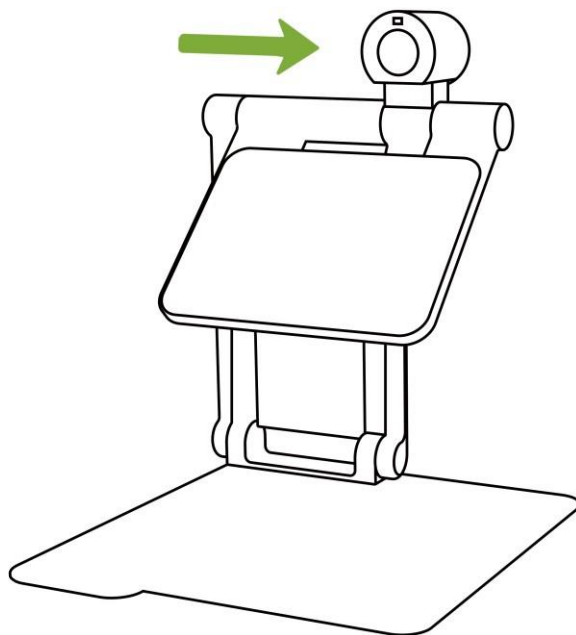


15
laipsnių
aukštyn



Žemyn 40
laipsnių


Įkraukite akumuliatorių

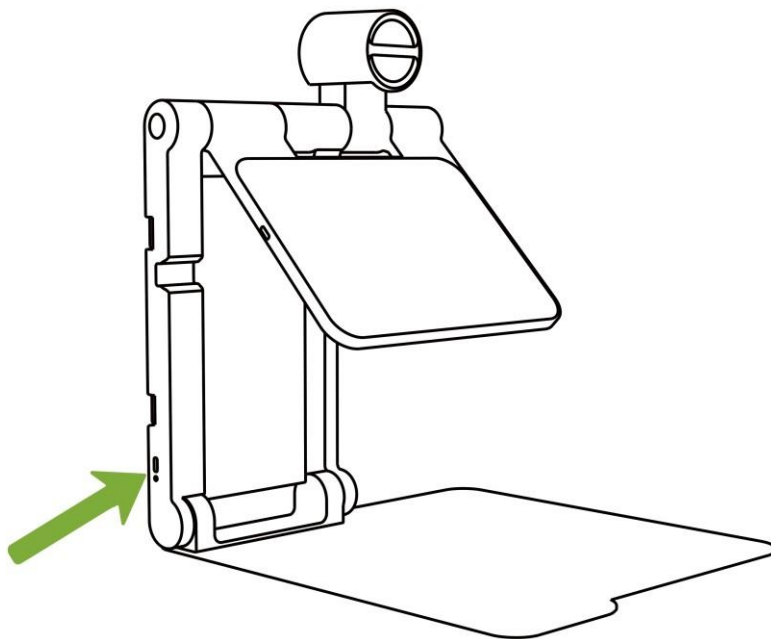

Prijunkite įkrovimo laidą prie įkrovimo prievado, esančio stovo apačioje.

Kol prietaisas įkraunamas, indikatoriaus lemputė šviečia geltonai, o visiškai įkrovus - žaliai.

Maitinimo įjungimas/išjungimas

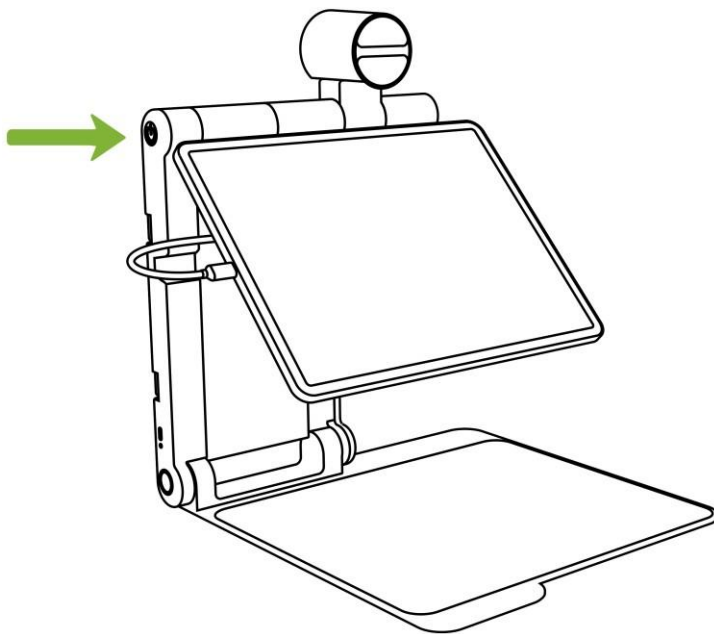

Norėdami įjungti / išjungti prietaisą, ilgai paspauskite įjungimo mygtuką 2 s, o kai prietaisas įjungtas, mygtuko lemputė šviečia žaliai.

APP pagrindinis puslapis



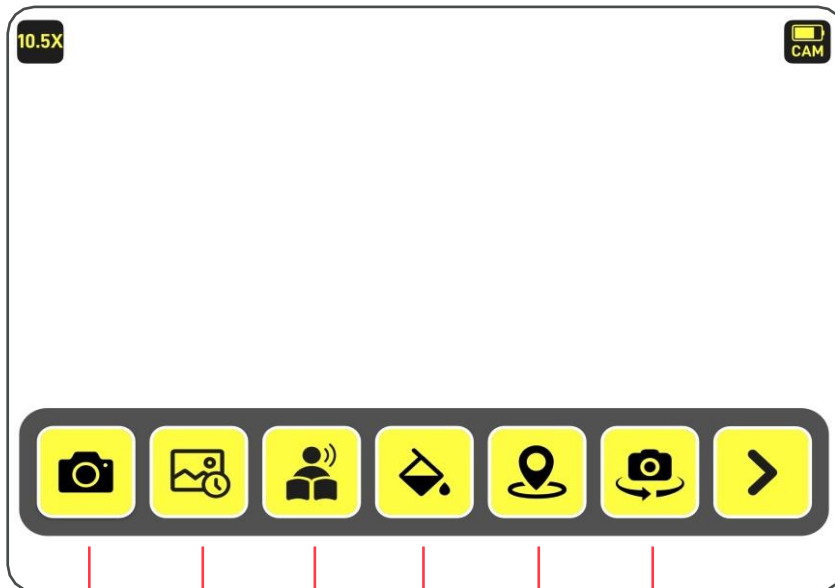


Foto Naujaisi OCR Spalvų režimas Rasti Fotoaparato
 keitimas

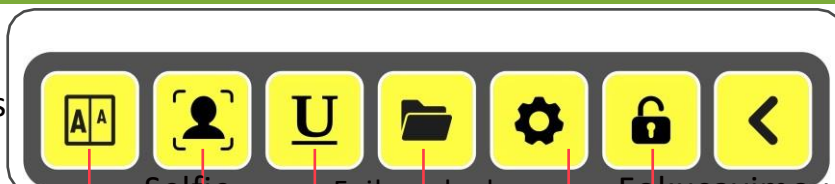

Išsamus vaizdas Skaitymo linija Nustatymai Fokusavimo užraktas

APP-OCR ir teksto keitimo į kalbą puslapis

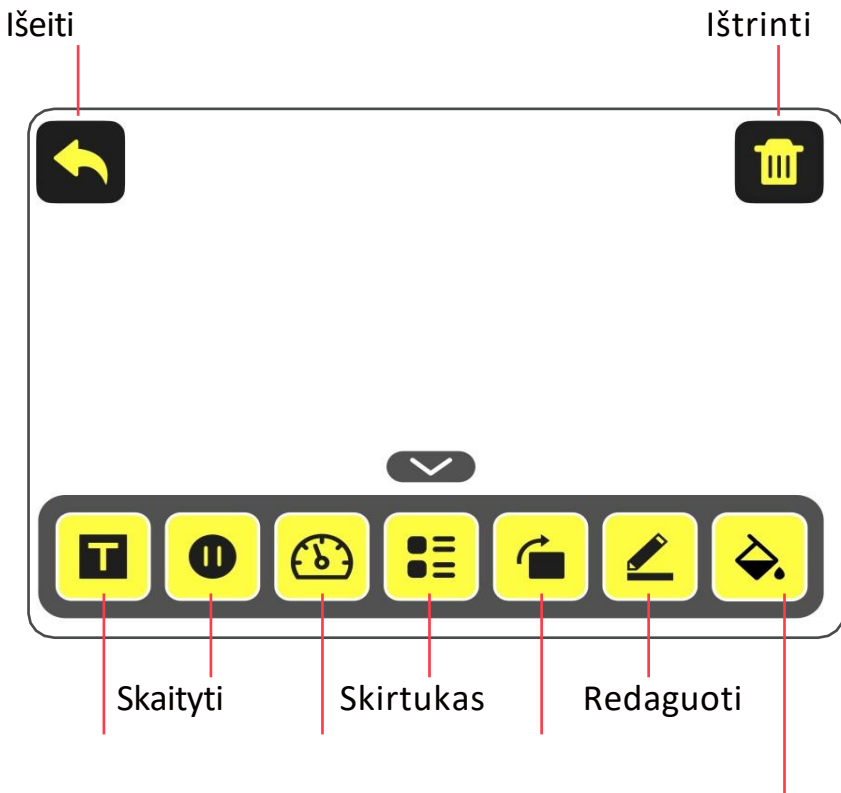


Vaizdas /
tekstas

Greitis

Keisti kryptį

Spalvų režimas

APP-Vaizdo redagavimo

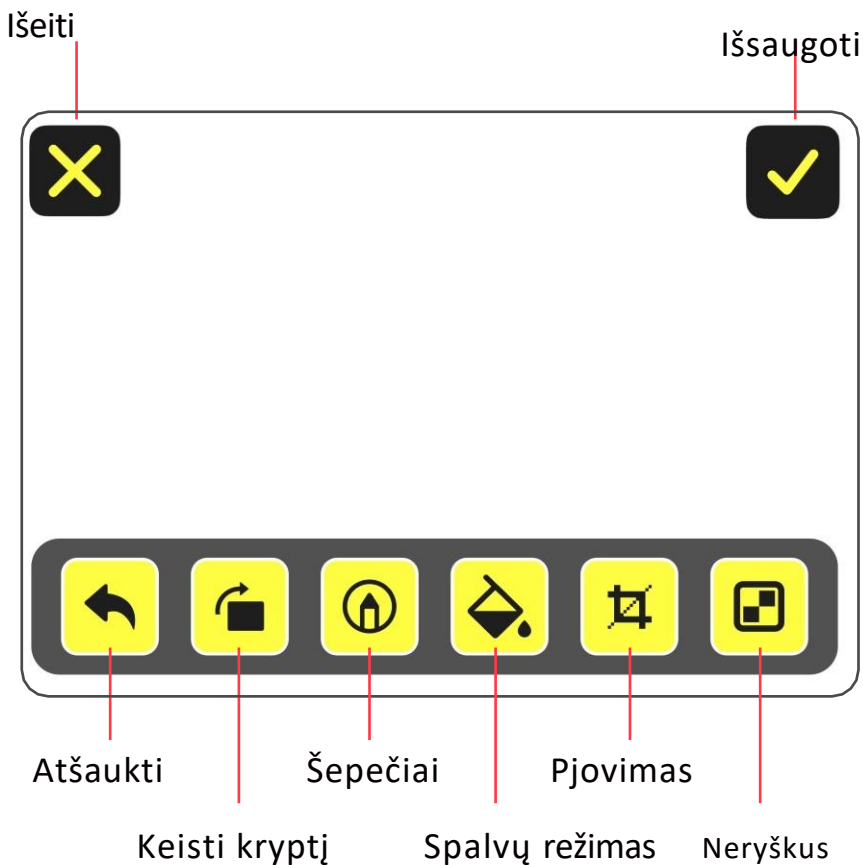

Kad geriau suprastumėte, kaip naudotis "Snow Pad", žiūrėkite instrukcijų vaizdo įrašus, esančius "Snow Pad" programėlės nustatymuose.

Specifikacijos

Padidinimas: 1-32x

Spalvų režimas: 10 kontrastingų spalvų režimų

Sulankstymo dydis: LWH 309*312*55 mm

Stovo aukštis: 278 mm

Fotoaparatas: 7x optinio priartinimo objektyvas,
automatinis fokusavimas, 1920*1080, 60FPS











Svoris: apie 2,4 kg

Baterijos veikimo laikas: ~5 val.









Įkrovimo laikas: ~4,5 val.

Adapteris: įvestis 100-240 V; išvestis 5V/3A


Sertifikavimas ir atitiktis

Simbolis	Pristatymai	Simbolis	Pristatymai
	CE simbolis		ĮGALIOTASIS ATSTOVAS EUROPOS BENDRIJOJE
	Gamintojo pavadinimas Adresas		Pagaminimo data
	Partijos kodas		Laikykite švarioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo lietaus, sniego, ledo, druskos ir vandens.
	Įspėjimai ir atsargumo priemonės		Nesterilus
	Medicinos prietaisas		Naudojimo terminas

Sertifikavimas ir atitiktis

	Laikykite sausai		Saugokite nuo saulės spindulių
	Žiūrėkite naudojimo instrukcijas		Unikalus įrenginio identifikavimas
	Gamybos šalis		Modelio numeris
	Importuotojas		Platintojas

Europos įgaliotasis atstovas: Įmonė : SUNGO Europe B.V.

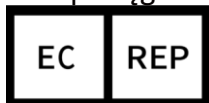

Adresas: Adresas: Fascinatio Boulevard 522, 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Nyderlandai

A- už klientą

Vardas ir pavardė:	Tel:
Paštas:	

B - Informacija apie produktą (platintojui)

Produkto pavadinimas / modelis:	Pirkimo data:
S/N	

ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED

El. paštas: support@zoomax.com

Aplankykite mus adresu:

www.zoomax.com